

Lancetas MedLance



Indicações

- Utilização em contexto clínico para recolha de amostra de sangue capilar de pacientes

Principais características do produto


- Activação simples e intuitiva, com botão de activação simples
- Zona generosa para aplicação
- Punção simples e suave
- Formato em T para maior estabilidade na punção
- Tamanho ideal para manuseamento
- Uso único

Nossa Referência

| Produto | Tamanho | Referência Quilaban |
|-----------|---------|---------------------|
| Med Lance | 21G | 545-549 |
| | 28G | 7141 |



Forma de utilização

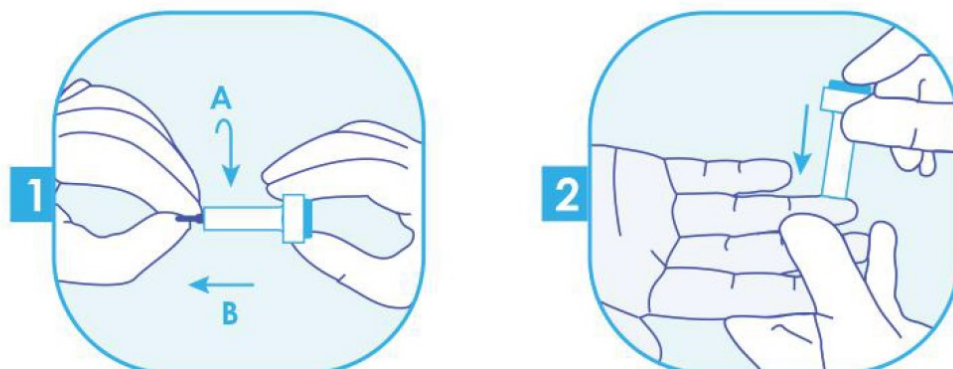

- Rode a patilha azul e seguidamente retire a mesma
- Encoste a parte proximal à região digital e pressione o botão na região distal.

Fabricante

HTL- Strefa S.A
Ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków

Data da última atualização: 01-01-2021